

GIBAUD

EQUALIZER® COURTE
EQUALIZER® LOW TOP



6718

FR | Notice d'utilisation

EN | Instructions for Use

IT | Istruzioni per l'uso

DE | Gebrauchsanweisung

Si vous avez le moindre doute concernant les applications et l'utilisation de ce dispositif médical, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin et/ou orthopédiste-orthésiste, pharmacien ou conseiller orthopédique.

INDICATIONS

Affections du pied et de la cheville pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement, notamment dans les cas suivants :

- Fractures stables du pied.
- Lésions des tissus mous.
- Utilisation post-opératoire, traumatologique ou en réadaptation.

PERFORMANCE

La botte de marche permet une immobilisation et/ou une restriction de mouvement de la cheville.

La botte de marche a une semelle incurvée qui permet un déroulé du pied naturel et stable.

Le dispositif a une semelle amortissante.

CONTRE-INDICATION

Aucune contre-indication n'est connue.

AVERTISSEMENTS • PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne retirez pas l'orthèse sans avis médical.

Ce produit a été conçu et testé sur la base d'une utilisation sur un seul patient et n'est pas recommandé pour une utilisation sur plusieurs patients.

La botte de marche ne doit pas être placée au contact direct d'une peau lésée.

Si des irritations cutanées se développent, consultez immédiatement un professionnel de santé.

Assurez-vous que le patient effectue des contrôles de sa circulation sanguine. Si une perte de circulation

sanguine est ressentie ou si la botte de marche est trop serrée, relâchez les sangles de fermeture et ajustez-les à un niveau confortable. Si l'inconfort persiste, le patient doit contacter immédiatement son professionnel de santé.

Lorsque la botte de marche est prescrite à des patients atteints de diabète, de déficience vasculaire ou de neuropathie une prudence et une attention supplémentaires sont nécessaires.

Ne retirez pas les coussinets intérieurs en mousse qui adhèrent au plastique de la botte de marche.

En cas de problème avec l'utilisation de ce produit, contactez immédiatement votre professionnel de santé.

L'utilisateur et / ou le patient doivent signaler tout incident grave survenu en rapport avec le dispositif au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et / ou le patient est établi.

CARACTERISTIQUES DU DISPOSITIF

Immobilisation relative de la cheville et du pied en angle droit.

Amortissement du talon et de la semelle plantaire par mousse de forte densité.

Capitonnage de la jambe et du pied avec possibilité de renforts locaux.

Semelle incurvée et antidérapante.

MISE EN PLACE

Un essai est obligatoire pour une adaptation correcte et une bonne compréhension de la mise en place.

La première mise en place sera effectuée par un professionnel de santé et ultérieurement par l'utilisateur ou une personne de son entourage selon le même protocole.

PRISE DE MESURE ET TABLEAU DES TAILLES

Taille à choisir en fonction de sa pointure.



Taille	0	1	2	3	4
Pointures	34 - 36	36 - 39	39 - 44	44 - 46	46 - 49

1) Ouvrir les trois sangles munies de crochets auto-agrippant et retirer la doublure amovible.

2) Placer le pied et le mollet dans la doublure amovible.

Si besoin, des coussinets peuvent être placés à l'intérieur de la doublure amovible pour combler des espaces. Il est également conseillé de placer un coussinet sur le dessus du pied avant la fermeture de la doublure pour plus de confort.

3) Fermer la doublure en serrant de manière ferme mais confortable à l'aide des crochets auto-agrippant.

4) Placer le pied dans la botte en écartant légèrement les montants verticaux.

- Le talon doit être calé contre la coque arrière de la botte. Les montants doivent être centrés sur l'axe de la jambe.

- Les axes pied / cheville et cheville / mollet doivent être perpendiculaires.

5) Retirer les languettes de protection situées à l'intérieur des montants de manière à fixer la doublure amovible sur la botte.

6) Refermer les sangles en partant du bas de manière à obtenir un maintien ferme mais confortable.

ENTRETIEN, CONSERVATION ET ELIMINATION

Conserver l'orthèse à l'abri d'une source de chaleur excessive.

Laver à la main à l'eau tiède savonneuse (maximum 40°C) ; rincer abondamment ; essorer doucement ; ne pas blanchir ; sécher à plat, ne pas sécher en machine ; ne pas repasser ; ne pas nettoyer à sec.

Jeter le dispositif et son emballage conformément à la réglementation locale ou nationale en matière d'environnement.

